

# Installationstips för **CareBidets & CareBidets XL**



## **Bidé-sitsen kräver endast anslutning till kallvatten och 230 V ström (med jordfelsbrytare)**

CareBidet JHC-511 passar på alla wc-stolar medan CareBidets XL JHC-512 som har en större sits kräver en större toalett skål. Något generellt kan sägas att är måttet från toalettstolens vattencistern fram till den invändiga kanten på wc-stolens skål min. 45 cm passar JHC-512 direkt. Är måttet min. 42 cm passar JHC-512 om man använder stänkskärm JHC-512-2 (tillbehör).

Vattenanslutningen till sitsen sitter på höger sida sett från sittande. En medföljande tryckslang möjliggör att ansluta sitsen till wc-stolens inkommande kallvatten via ett T-rör (medföljer) även om vattenintaget är på wc-stolens vänstra sida sett från sittande.

Elkabel (jordad stickpropp) är 150 cm lång och sitter ansluten i sitsen på dess högra sida sett från sittande.