

Vatten installation

Renoletto Basic kan anslutas till vatten på två sätt. Det första är att ansluta den till kallvattenintaget till wc-stolen. Det kan kännas konstigt och obehagligt att duscha rumpan med kallvatten men porerna täpper till sig direkt och du känner knappt att vattnet är kallt. Om anslutning till wc-stolen är med slang kan Du (bild 1)

- Stänga den befintliga avstängningsventilen på wc-stolen
 - Spola wc-stolens vattenbehållare tom från vatten
 - Lossa avstängningsventilen från wc-stolen
 - Montera det medföljande T-röret där avstängningsventilen tidigare satt monterad i wc-stolen. Glöm ej packningen.
 - Skruva fast avstängningsventilen i T-rörets vertikala gänga
 - Anslut bidé-sitsens slang till den horisontala gängan.
 - Drag åt muttrarna så det blir tätt
 - Öppna ventilen och kontrollera så att inget läckage uppstått
 - ev läckage måste åtgärdas före användandet av bidé-sitsen
- Nu är Din Renoletto klar att användas

Tempererat vatten

Ett annat sätt är att ansluta bidé-sitsen till en redan befintlig eller ny termostatblandare och på det sättet få tempererat vatten i bidé-sitsen, bild 2.

Den tryckslang som medföljer bidé-sitsen kan då behövas bytas ut mot en längre slang. Detta arbete kan vara lite mer komplicerat och kanske behöver Du ta hjälp av en fackman. Termostatblandare kan Du köpa via Rebex HomeCare AB eller från något byggvaruhus

Byte av munstycke

Renoletto Basic levereras med ett munstycke som är avsedd för rektal rengöring. Bipackat finns även ett FEMALE munstycke som har två duschvinklar. Önskar Du byta munstycke lossar Du de båda stjärnskruvarna, tar försiktigt ur skärm, spolkolv och fjäder. Ta bort fjädern och montera den på den nya kolven och återmontera. Tips! Fotografera momenten!

VIKTIGT

Försäkra Dig som användare/ägare av produkten att Du vet var vattentillförsel stängs av!



1



2



3



4