

MONTERING AV RENOLETTO

VIKTIGT! Renoletto skall monteras på en toalettstol placerad där det inte föreligger risk att den överspolas med vatten från dusch eller motsvarande. Apparaten får heller inte utsättas för hög luftfuktighet. Ventilera vid behov.

- 1) Du får inte lyfta enheten i bidé-sitsen. Det kan skada produkten! Bild 1
- 2) Demontera den befintliga toalettsitsen och kontrollera så wc-stolen är hel och ren. Trasig wc-stol byts ut mot hel. Placera sedan de båda centreringskonorna i porslinets hål avsedda för sits. Kontrollera avståndet mellan hålen i wc-stolen. Bild 2
- 3) Lyft sedan upp bidé-enheten ur kartongen och ställ ner den på golvet/bordet. Lossa muttrarna från emballaget. Lyft upp enheten försiktigt och ställ dig framför wc-stolen, Bild 3. Justera avståndet mellan gängstängerna till samma avstånd som mellan hålen i porslinet.
- 4) Placera nu ner sitsen försiktigt på wc-stolen. Var noga med att inte stöta emot bidé-enheten mot porslinet, bild 4.
- 5) Justera sitsen så den sitter rätt på wc-stolen i sidled och djup. Avsluta med att låsa enheten med de två medföljande halsmuttrarna alt. vingmuttrar med brickor.

Viktigt !


Kontrollera så att bidé-enheten sitter ordentligt fast på toalettstolen och avsluta med att montera de med följande täckbrickorna. Bild 5.



1




2

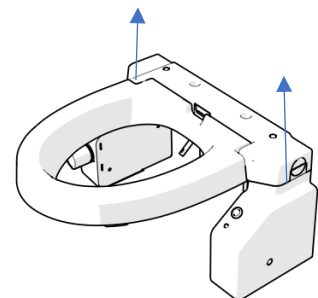

3



4

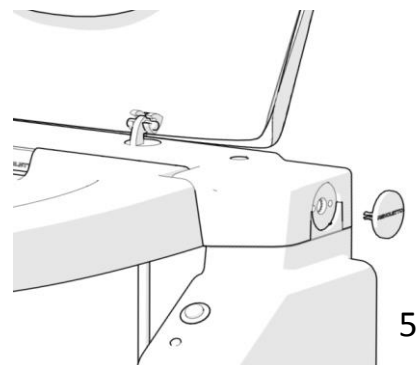

5