

MONTERING AV RENOLETTO

VIKTIGT!

Renoletto får bara monteras på en hel toalettstol

**Förstår Du inte anvisningen kontaktar Du
Rebex HomeCare AB**

- 1) Du får inte lyfta enheten i bidé-sitsen. Det kan skada produkten, bild 1!
Håll i hela enheten vid lyft.
- 2) Tag bort den gamla toalettsitsen.
- 3) Placera sedan de båda centrerings-konorna i porslinets hål avsedda för sits. Bild 2
- 4) Lyft upp produkten ur sitt emballage, justera de båda gängstängerna så att avståndet stämmer överens med toalettstolens mått (oftast 155 mm).
Tryck ner gängstängerna genom centrerings-konorna och vidare genom porslinet tills sitsen ligger helt an mot porslinet. Centra sitsen på wc-stolen. Bild 3.
- 5) Avsluta med att låsa sitsen med de båda hals-muttrarna, bild 4. Vänd den smala delen av muttern uppåt så den går in i porslinet.

Viktigt!

Kontrollera så att bidé-enheten sitter ordentligt fast på toalettstolen.



1



2



3



4