

QUICK GUIDE

CareBidet

Automatik

- Använd 01-kontakten
- Sätt Dig på toalettsitsen och låt överkroppen luta lite framåt
- Tryck en gång på kontakten och avvakta att det valda programmet ska starta.
- Bidé-sitsen kommer nu att genomföra det program som är valt under AUTO 1 på fjärrkontrollen. För ytterligare information se bruksanvisningen på sidorna 10 och 11
- Om Du trycker en gång till avbryts programmet. Trycker Du ytterligare en gång startas programmet från början

Rengöring av munstycke



Rengör toalettstolen som vanligt men skölj inte vatten över stol eller bidé-sits utan använd våt trasa och avsluta med att torka torrt. Kom ihåg att dra ut munstyckena helt och torka av dem. Ca varannan månad kan munstyckena med fördel rengöras med mild kalklösning. Använd en gammal tandborste.