

RENOLETTO Basic

bidé-sits

Brukar och installationsanvisning



Detta är original bruks och installationsanvisning

- Bidé-sitsen skall installeras enligt denna manual
- Läs manualen noga och följ instruktionerna
- Spara denna manual för eventuella framtida behov

Tack för att Du valt **RENOLETTO Basic!**

Våra Renoletto produkter är under ständig utveckling och därför kan denna anvisning skilja något från den produkt Du nu har fått.

Vid osäkerhet eller frågor kontakta Rebex HomeCare AB

För att Du ska få ut mesta möjliga av Din **RENOLETTO** ska Du läsa denna anvisning innan Du börjar användandet.

Förvara denna handling på säker plats för eventuella framtida behov.

Har Du frågor eller bara undrar över något som Du tror vi kan svara på är Du alltid välkommen att höra av Dig till oss på Rebex HomeCare AB

MILJÖ

Denna produkt är konstruerad och tillverkad från idé till slutprodukt med största hänsyn taget till minimal miljöpåverkan.

Inköpsdatum : _____

Kund : _____

Tillverkningsnr. : _____ Sign. _____

Installatör VVS : _____

Tillverkare: Rebex HomeCare AB Storgatan 44 590 36 Kisa SWEDEN

www.bide.se bide@bide.se 0046 494 71818

INNEHÅLL

Framsida	1
Information och uppgifter	2
Innehållsförteckning (denna sida)	3
Beskrivning av produkten	4
Viktiga säkerhetsregler	4
Uppackning och garanti	5
Montering	6
Vatteninstallation	7
Rengöring & underhåll	8
Problem, innan Du ringer	9
Teknisk dokumentation	9
Mått & Miljö	10
Renolettos modeller	11
Baksida	12

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

ANVÄNDNING. RENOLETTO monteras på den befintliga toalettstolen förutsatt att det finns genomgående hål för sitsars fastsättning i wc-stolen. Med hjälp av vatten blir användaren ren efter toalettbesöket. Renoletto Basic levereras med ett rektalt duschmunstycke monterat men bipackat finns även ett Female (2 stråligt) munstycke.

Använd toalettsitsen till vad den är till för. Stå aldrig på eller utsätt sitsen för oriktig handhavande!

MANÖVER. Renoletto Basic manövreras med ett vred på höger sida sett från sittande.

VATTENANSLUTNING. Antingen ansluts bidé-sitsen till wc-stolens intag för kallvatten eller också ansluts den till en termostatblandare för att erhålla tempererat vatten.

VATTENTRYCK. Styrkan på duschstrålen avgör Du själv. Ju mer öppet vredet är desto högre vattentryck.



VIKTIGA SÄKERHETSREGLER

LÅT INTE BARN VARA ENSAMMA MED PRODUKTEN. OM LOCKET ÄR UPPFÄLLT OCH MAN ÖPPNAR VENTILEN KOMMER VATTEN ATT STRÖMMA UT UTANFÖR TOALET - STOLEN OCH KAN DÅ ORSAKA STOR SKADA PÅ EGENDOM OCH FASTIGHET. LOCKET SKA ALLTID VARA NERFÄLLT NÄR BIDÈ-SITSEN INTE ANVÄNDS!

1. Halkrisk kan förekomma om golv eller fötter är blöta/våta.
2. Tänk på att inte ha mattor eller andra saker runt wc-stolen som Du kan snubbla på
3. Finns minsta risk eller misstanke om att fel uppstått eller kommer att uppstå på produkten eller dess anslutningar skall användandet omedelbart avbrytas. Stäng av vattnet och kontakta Din installatör.
4. Använd produkten enligt anvisning i denna manual.
5. Använd inte andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren.
6. Använd aldrig produkten om följande inträffat:
 - Trasig vattenanslutning eller att bidéns funktion inte fungerar korrekt
Åtgärd: Läs avsnitt "Problem". Finns inte hjälp där kontakta reparatör/installatör eller leverantören.
7. Håll produkten ren från urin, hår, damm och andra likvärdiga partiklar
8. Utsätt inte duscharmnen eller andra delar för ovarsam behandling. Bidé-sitsen ska varsamt fällas upp och ner, ej "släppas"! Delarna och eller dess funktion kan förstöras av oriktigt handhavande!


UPPACKNING AV RENOLETTO

VIKTIGT! Kontrollera att inga delar är skadade vid leverans. Ser eller misstänker Du att produkten eller dess emballage är skadat vid leverans är det mycket viktigt att Du direkt anmäler detta till transportören av varan! Fotografera skadan!

LYFT INTE RENOLETTO i BIDÉ-SITSEN utan lyft upp hela enheten samtidigt från emballaget!

Följande delar ingår i en leverans av Renoletto Basic

Bidésits, platsits med lock, tryckslang för kallvatten, T-stycke för kallvatten, manual samt detaljer för festsättning av bidé-sitsen i toalettstolen

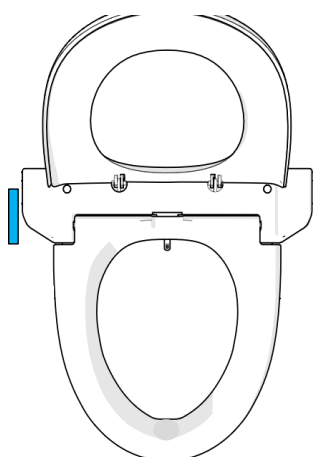

Emballage & avfall

Kartongen sorteras i avfall för kartong/ Wellpapp. Foam och plastpåsar i plastavfall. Sitsar och kåpor 05. Munstycke och stöcklackar 07. Metall i RF

GARANTI

Samtliga Rebex HomeCare AB:s produkter har två års garanti mot material och produktionsfel räknat från inköpsdagen. Produkt som innehåller material eller produktionsfel reklameras skriftligen till Rebex HomeCare AB och ersätts med ny produkt. Rebex HomeCare AB står för returfrakten. Kontakta alltid Rebex HomeCare AB innan produkten skickas i retur! Installationsfel anmäls till ansvarig installatör. Skulle felaktigheter uppstå på produkt under garantitiden och som inte är att hänföra till material och/eller produktionsfel utan gäller handhavandefel eller annan skada gäller inte produktgarantin. Eventuell reparation utförs då mot ekonomisk ersättning. Offert lämnas innan reparation. Eventuella frågor eller oklarheter ska framställas via mail eller brev per traditionell post för att inga tveksamheter avseende ansvar ska förekomma



MONTERING AV RENOLETTO

VIKTIGT!

Renoletto får bara monteras på en hel toalettstol

**Förstår Du inte anvisningen kontaktar Du
Rebex HomeCare AB**

- 1) Du får inte lyfta enheten i bidé-sitsen. Det kan skada produkten, bild 1!
Håll i hela enheten vid lyft.
- 2) Tag bort den gamla toalettsitsen.
- 3) Placera sedan de båda centrerings-konorna i porslinets hål avsedda för sits. Bild 2
- 4) Lyft upp produkten ur sitt emballage, justera de båda gängstängerna så att avståndet stämmer överens med toalettstolens mått (oftast 155 mm).
Tryck ner gängstängerna genom centrerings-konorna och vidare genom porslinet tills sitsen ligger helt an mot porslinet. Centra sitsen på wc-stolen. Bild 3.
- 5) Avsluta med att låsa sitsen med de båda hals-muttrarna, bild 4. Vänd den smala delen av muttern uppåt så den går in i porslinet.

Viktigt!

Kontrollera så att bidé-enheten sitter ordentligt fast på toalettstolen.



1



2



3



4

Vatten installation

Renoletto Basic kan anslutas till vatten på två sätt. Det första är att ansluta den till kallvattenintaget till wc-stolen. Det kan kännas konstigt och obehagligt att duscha rumpan med kallvatten men porerna täpper till sig direkt och du känner knappt att vattnet är kallt. Om anslutning till wc-stolen är med slang kan Du (bild 1)

- Stänga den befintliga avstängningsventilen på wc-stolen
 - Spola wc-stolens vattenbehållare tom från vatten
 - Lossa avstängningsventilen från wc-stolen
 - Montera det medföljande T-röret där avstängningsventilen tidigare satt monterad i wc-stolen. Glöm ej packningen.
 - Skruva fast avstängningsventilen i T-rörets vertikala gänga
 - Anslut bidé-sitsens slang till den horisontala gängan.
 - Drag åt muttrarna så det blir tätt
 - Öppna ventilen och kontrollera så att inget läckage uppstått
 - ev läckage måste åtgärdas före användandet av bidé-sitsen
- Nu är Din Renoletto klar att användas

Tempererat vatten

Ett annat sätt är att ansluta bidé-sitsen till en redan befintlig eller ny termostatblandare och på det sättet få tempererat vatten i bidé-sitsen, bild 2.


Den tryckslang som medföljer bidé-sitsen kan då behövas bytas ut mot en längre slang. Detta arbete kan vara lite mer komplicerat och kanske behöver Du ta hjälp av en fackman. Termostatblandare kan Du köpa via Rebex HomeCare AB eller från något byggvaruhus

Byte av munstycke

Renoletto Basic levereras med ett munstycke som är avsedd för rektal rengöring. Bipackat finns även ett FEMALE munstycke som har två duschvinklar. Önskar Du byta munstycke lossar Du de båda stjärnskruvarna, tar försiktigt ur skärm, spolkolv och fjäder. Ta bort fjädern och montera den på den nya kolven och återmontera. Tips! Fotografera momenten!

VIKTIGT

Försäkra Dig som användare/ägare av produkten att Du vet var vattentillförsel stängs av!

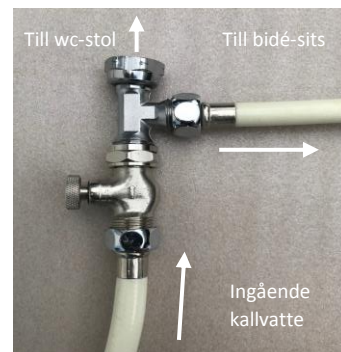

1



2



3




4

Rengöring & underhåll

Rengöring av bidé-sits och kåpor

Det är viktigt att Du håller Din Renoletto ren och fräsch men utan att överdriva. Torka delarna med en urvriden trasa typ Wettex. Använd ett mildt rengöringsmedel/tvållösning och eftertorka med ren trasa. Använd inte Micro fiber, Svinto eller annat material som kan skada plasten. Alla plastdetaljer är tillverkade av Polypropen och Nylon och även om detta är mycket slitstarka material kan man skada ytorna vid felaktigt handhavande!

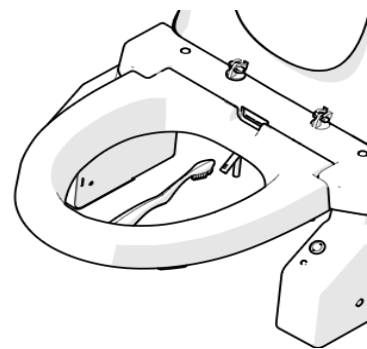

Rengöring av munstycke

Veckovis eller efter behov. Dra försiktigt ut den bakre duscharmaren till stopp. Använd mildt rengöringsmedel/tvål och en gammal tandborste.

Var 2-3:e månad eller beroende på vattnets hårdhet, häll lite 12 % ättika eller mild citronlösning över duschmunstycket och dusch armen. Låt verka 1 minut och använd tandborste eller motsvarande för att ta bort kalkavlagringar. Tvätta med vatten och torka efter med ren trasa. Täppta hål kan öppnas med tunn nål. Tryck ej in kalk eller liknade i munstycket.



PROBLEM? Innan Du kontaktar service


Problem	Orsak	Lösning
Jag blir inte ren	För lågt vattentryck Du sitter fel	Öppna ventilen/vredet mer Sätt Dig längre bak eller fram.
Duscharmnen kommer inte ut eller bara en liten bit.	Det är smuts på duscharmnen	Rengör, se sid 8
Funktionen fungerar inte	Vattentrycket för lågt	Kontrollera så bidé-sitsen får vatten

Teknisk dokumentation

Modell namn	Renoletto Basic	art. nr. 60-125
Vattentryck min/max	3-8 bar / 0,3-0,8 Mpa	
Nettovikt produkt	3 kg	
Max brukarvikt	200 kg	
Plastmaterial sits & kåpa	Polypropen (PP) Recy. nr 05	
Duschmunstycke och stödklack	Nylon (PA) Recy. nr 07	
Plåtdetaljer	Rostfritt stål	



Mått RENOLETTO BASIC

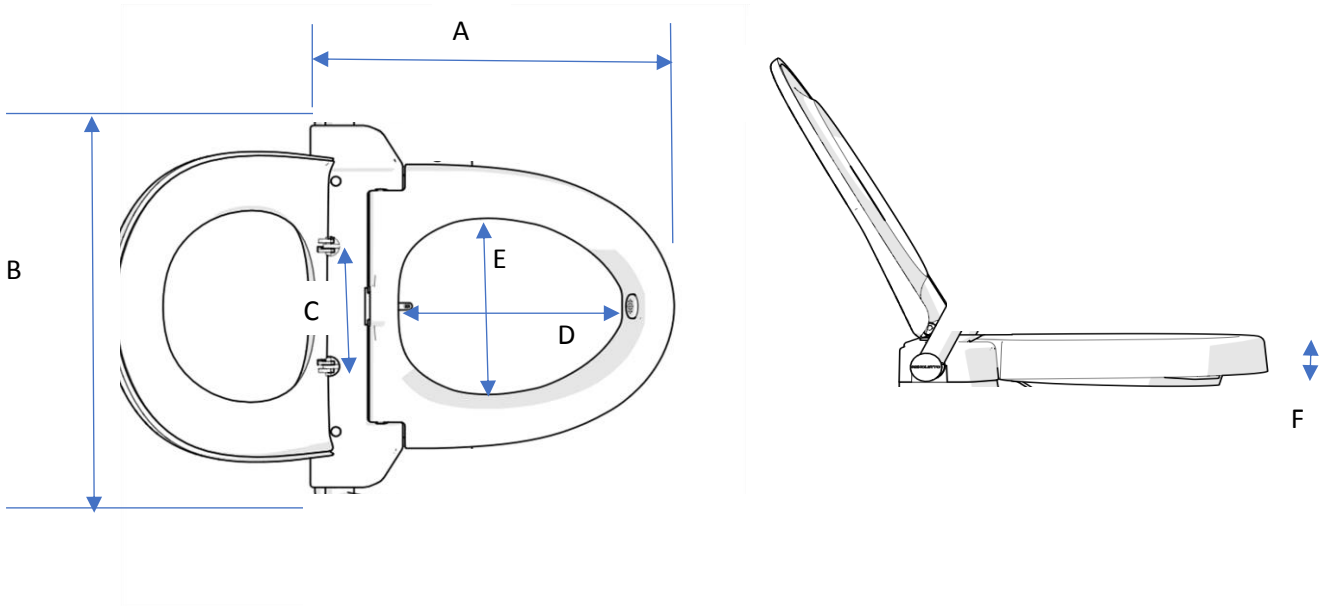

A)	55 cm	B)	53 cm	C)	13-17 cm
D)	30 cm	E)	23 cm	F)	5 cm

Miljö

Redan då en produkt börjar anta form på ritbordet ska varje moment och val av material göras utifrån största möjliga hänsyn till miljön. Så har vi gjort i framtagningen av Renoletto och så kommer att ske när tillbehör och nästa generations Renoletto en dag kommer till världen.

Den dagen Din Renoletto inte längre behövs är därför viktigt att destruktion av produkter sker på ett miljömässigt riktigt vis!

Renoletto bidé-sitsar finns i tre modeller

A B C

Renoletto Aqua

Denna modell har ett rektalt munstycke likt Basic men även ett feminint munstycke som sitter monterad i framkant på sitsen och duschar horisontalt. Det finns ett tredje munstycke som sörjer för att varmvattnet spolas fram samtidigt som det tvättar av det rektala munstycket. Aqua är utrustad med en termostatblandare från Mora Armatur samt 3 st magnetventiler som drivs av ett 9V batteri. Aqua kan manövreras manuellt eller helautomatiskt.



Renoletto Basic

Basic är vår enklaste modell men fyller väl sin funktion. Basic har två alternativa munstycken och kan anslutas till tempererat vatten.



Renoletto Compact


Compact är vårt flaggskepp som likt Aqua har tre munstycke men också varmluftfläkt som torkar torrt. Renoletto Compact är även utrustad med "night care" belysning både utvändigt och invändigt.

Compact ska anslutas till 230V ström men drivs av 48V transformator. Både Aqua och Compact säljs oftast via ett s.k. BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Bidraget får man genom sin kommun om en arbetsterapeut eller motsvarande intygar att Du inte klarar intimhygien på annat sätt.

Till både Aqua & Compact finns ett stort utbud av tillbehör.



RENOLETTO.....

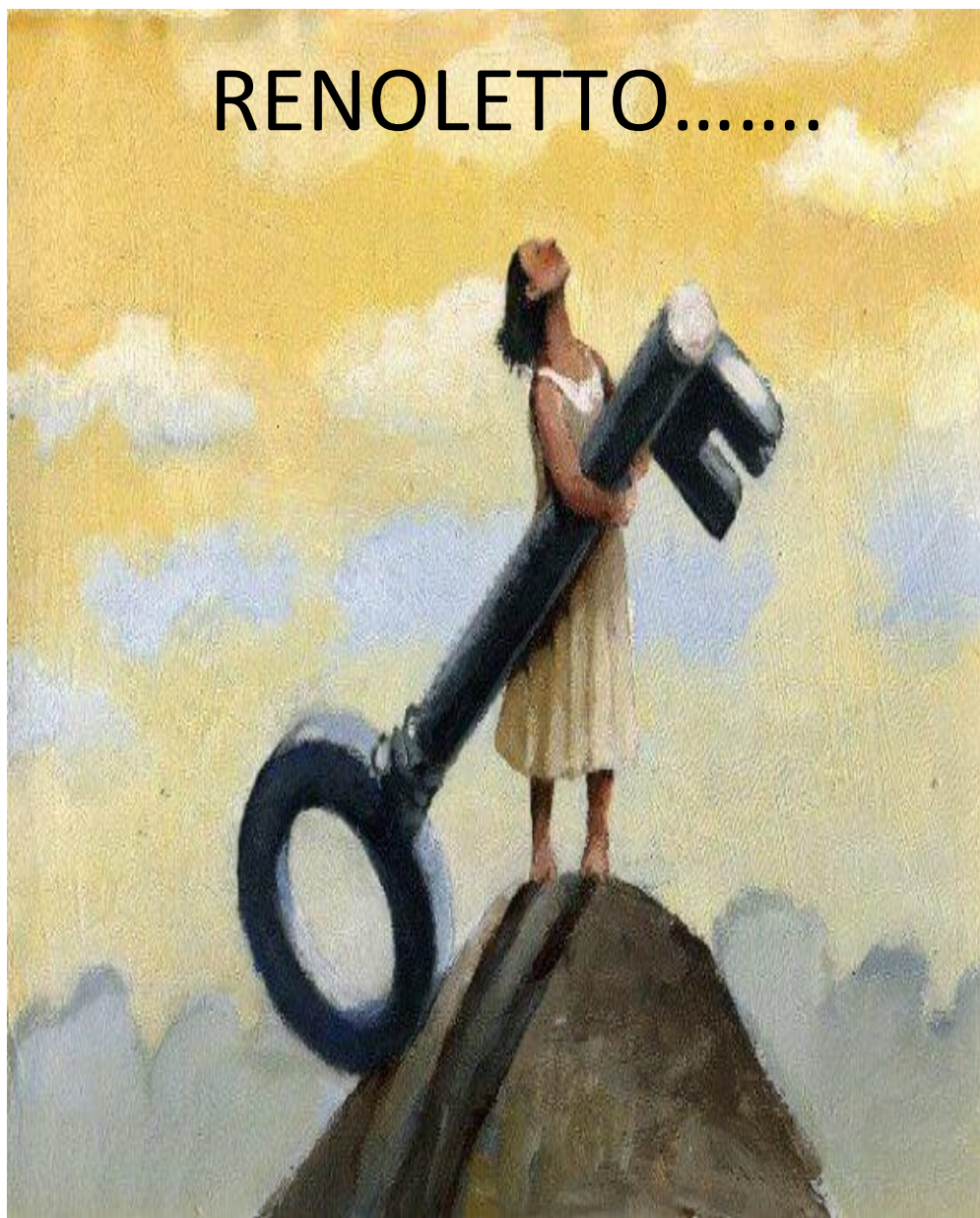

...en nyckel till ett friare liv!

REBEX Homecare.
Gör vardagen lite enklare.