

# Snabbguide **Renoletto Basic**



Renoletto BASIC är mycket enkel att använda.

Sätt Dig på toalettsitsen och gör vad Du ska.

På höger sida sett från sittande finner du en spak.



När spaken är i horisontalläge är ventilen till duschen stängd.

När spaken förs uppåt öppnas ventilen till duschen och är fullt öppen när spaken pekar rakt upp.



När du duschat klart kan Du med fördel fälla ner locket, lägga en handduk på locket och sätta Dig på den för att bli torr!

**Lämna aldrig barn ensamma på toaletten!**