

Snabbguide **Renoletto Aqua**



Renoletto Aqua är mycket enkel att använda.

Sätt Dig på toaletsitsen. När Du uträttat Dina behov trycker Du på knappen på den vänstra kåpan och ett **AUTOMATISKT**

rengöringsprogram startar enligt följande:

- **CLEANING**): Varmvatten spolats fram i 30 sek. och tvättar samtidigt av munstycket
- Direkt efteråt startar duschningen och pågår i en minut. Det gäller både **RECTAL** och **FEMALE**-duschen. (Vill Du inte använda **FEMALE**-duschen stänger Du av den med vredet på sidan)
- Vill du förlänga duschningen så trycker du på knappen igen när programmet avslutats.
- Nu är Du ren. Ställ Dig upp, fäll ner locket och lägg en handduk på locket som Du sätter Dig på och därmed blir Du torr!



Renoletto har sittvakt vilket innebär att du måste sitta på sitsen för att den ska fungera.

En blå lampan tänds i wc-skålen när du sätter dig ner och slocknar när Du ställer Dig upp.



Renoletto Aquas ventiler styrs av ett 9V batteri. När spänningen blir för låg i batteriet och det är dags att byta batteri börjar en röd lampan blinka på den vänstra kåpan.

Som tillbehör finns en handkontroll där Du själv bestämmer över vilka duschar du vill använda och hur länge du ska duscha.

Även en handkontroll för helautomatik finns som tillbehör