

## PROBLEM? Innan Du kontaktar service


Problem	Orsak	Lösning
Jag blir inte ren	För lågt vattentryck Du sitter fel	Öppna ventilen/vredet mer Sätt Dig längre bak eller fram.
Duscharmen kommer inte ut eller bara en liten bit.	Det är smuts på duscharmen	Rengör, se sid 8
Funktionen fungerar inte	Vattentrycket för lågt	Kontrollera så bidé-sitsen får vatten

## Teknisk dokumentation

Modell namn	Renoletto Basic	art. nr. 60-125
Vattentryck min/max	3-8 bar / 0,3-0,8 Mpa	
Nettovikt produkt	3 kg	
Max brukarvikt	200 kg	
Plastmaterial sits & kåpa	Polypropen (PP) Recy. nr 05	
Duschmunstycke och stödklack	Nylon (PA) Recy. nr 07	
Plåtdetaljer	Rostfritt stål	



# Mått RENOLETTO BASIC

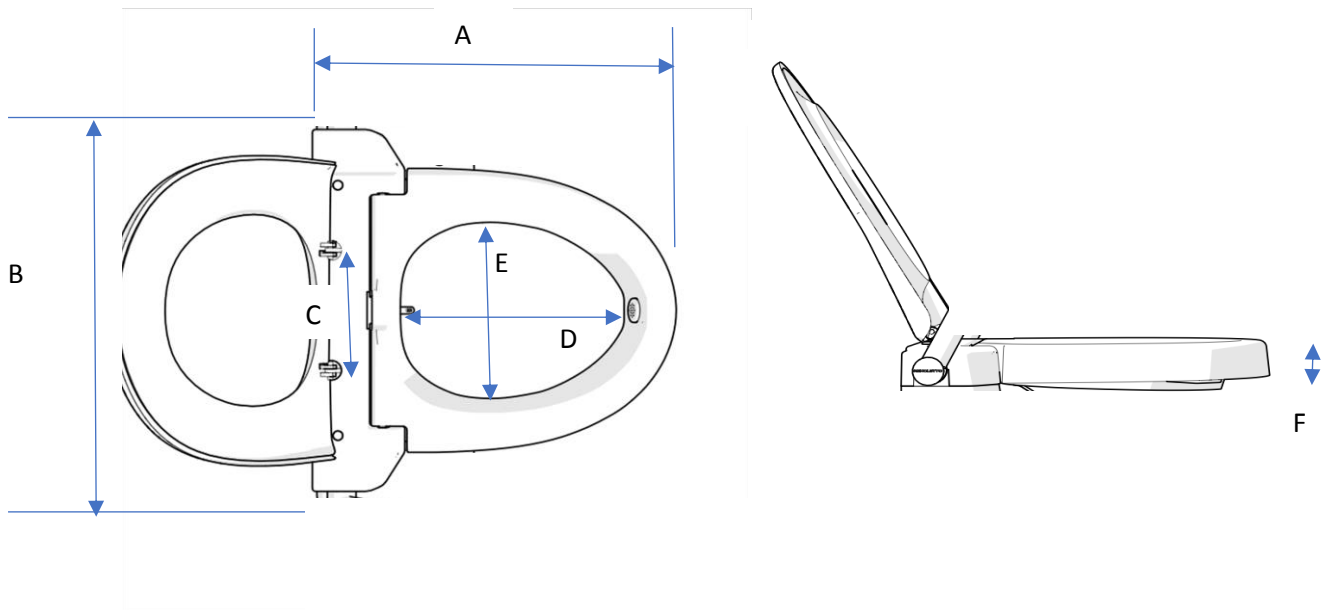

A)	55 cm	B)	53 cm	C)	13-17 cm
D)	30 cm	E)	23 cm	F)	5 cm

## Miljö

Redan då en produkt börjar anta form på ritbordet ska varje moment och val av material göras utifrån största möjliga hänsyn till miljön. Så har vi gjort i framtagningen av Renoletto och så kommer att ske när tillbehör och nästa generations Renoletto en dag kommer till världen.

Den dagen Din Renoletto inte längre behövs är därför viktigt att destruktion av produkter sker på ett miljömässigt riktigt vis!